




PHAGO'SPRAY DASR

Désinfectant hydro-alcoolique
pour les surfaces alimentaires sans rinçage

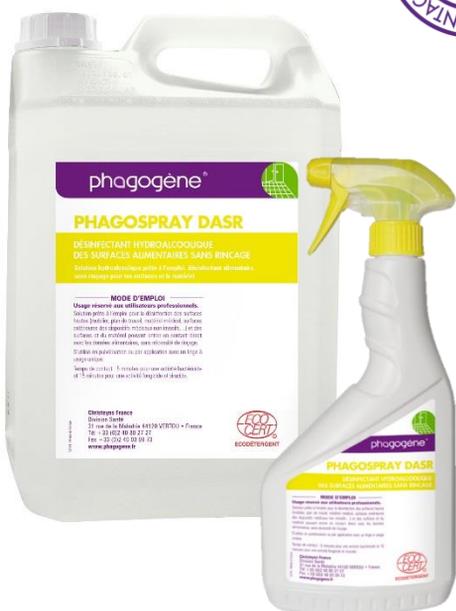

Points forts

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Large spectre désinfectant
- ✓ Formule ecocertifiée
- ✓ Produit « contact alimentaire » sans rinçage

Conditionnements

Présentation	Code	Nombre d'unité par carton
Flacon de 750 ml	65049	6 unités
Bidon de 5 litres	65050	2 unités
Vrac	65051	



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

Laboratoire
phagène®

Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrerie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagene.fr



PHAGO'SPRAY DAsR

Domaine d'utilisation

- ✓ Le **PHAGO'SPRAY DAsR** est un désinfectant hydro-alcoolique pour la désinfection des surfaces, des équipements et des mobiliers propres. Ne laisse pas de traces sur les surfaces.
- ✓ Le **PHAGO'SPRAY DAsR** peut être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
- ✓ Le **PHAGO'SPRAY DAsR** peut être utilisé, sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariot de repas, trancheurs, hachoirs, couteaux...)
- ✓ Le **PHAGO'SPRAY DAsR** peut être également utilisé sur les jouets pour une désinfection complète.

Composition

- ✓ Actif désinfectant:
 - Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m
- ✓ Contient aussi : Eau, correcteur d'acidité
- ✓ 99,90% du total des ingrédients sont d'origine naturelle

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP 4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques

- ✓ Aspect : liquide limpide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Odeur : alcool
- ✓ pH à 20°C (produit pur) : 5 à 7
- ✓ Point éclair : 23°C

Mode d'emploi

- ✓ Le **PHAGO'SPRAY DAsR** est prêt à l'emploi.
- ✓ Pulvériser sur un linge à usage unique et appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.
- ✓ Pulvériser les surfaces préalablement nettoyées à une distance de 20 à 30 cm à raison de 30-40 ml/m².
- ✓ Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide et virucide; 15 minutes pour une activité fongicide.

Compatibilité

- ✓ Faire un essai au préalable sur plexiglass.

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

Laboratoire
phagogène®

Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr



PHAGO'SPRAY DASR

Précautions d'emploi

- ✓ Produit réservé à un usage professionnel
- ✓ Péréemption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- ✓ La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com

Activité antimicrobienne

Normes	Concentration	Temps
<u>BACTERICIDE</u>		
EN 1040 (<i>P. aeruginosa</i> et <i>S. aureus</i>)	100 %	5 min.
EN 1276 (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i>)	100 %	5 min.
EN 13727+A2 (<i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>)	80%	5 min.
EN 13697 (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i>)	100 %	5 min.
<u>FONGICIDE</u>		
EN 1275 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 1650 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 13624 (<i>C. albicans</i>)	80%	15 min.
EN 13624 (<i>Aspergillus brasiliensis</i>)	97%	15 min.
EN 13697 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
<u>VIRUCIDE</u>		
BVDV et Vaccinia virus	100 %	5 min.
Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1	100 %	5 min.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

