





## **MASQUE TYPE FFP2** **AVEC VALVE**

<b>Nom du produit</b>	<b>Masque jetable type FFP2 avec valve</b>
<b>Référence</b>	<b>FFP2AV</b>
<b>Utilisation</b>	Masque filtrant anti-virus, anti-allergènes, anti-pollution : <ul style="list-style-type: none"><li>• contre les poussières telles que béton, ciment, plâtre, etc ...</li><li>• contre l'inhalation d'agents infectieux transmis par voie aérienne</li><li>• contre tout risque de transmission par voie gouttelettes</li></ul>
<b>Description</b>	Masque jetable offrant une protection intégrale au porteur : <ul style="list-style-type: none"><li>• avec valve</li><li>• non stérile, non irritant, hypoallergénique</li><li>• serrage par élastiques durables et confortables pour un port de plusieurs heures (conçus pour être larges, souples et doux)</li><li>• barrette nasale permettant d'ajuster le positionnement du masque et d'éviter l'entrée des particules et la buée pour les porteurs de lunettes)</li></ul> <p>S'adapte à tous les types de visages</p>
<b>Données test</b>	Efficacité de filtration bactérienne d'au moins 94% des aérosols Fuite totale vers l'intérieur : < 22%
<b>Durée de port préconisée</b>	8 heures
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Composition</b>	Extérieur : Polypropylène non-tissé
<b>Informations complémentaires</b>	Conforme à la norme NF EN149:2001+A1:2009 / FFP2 Équipement de protection individuelle (EPI)    
<b>Pays d'origine</b>	RPC (République Populaire de Chine)

*Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par l'importateur :*

## LOGISTIQUE

Conditionnement BOÎTE DE 10 PCS

Stockage

Durée de vie : 4 ans  
Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil  
Stockage entre 5°C et 40°C



Précautions d'utilisation

Une fois mis en place le masque ne doit plus être touché.  
Le masque doit être remplacé à chaque changement d'activité.  
Le masque doit être jeté dès qu'il est mouillé ou souillé.

### Notice d'utilisation



- A. Préformez la barrette de nez en la pliant en son milieu et ouvrez le masque.
- B. Positionnez les élastiques sur la partie supérieure du masque.
- C. Placez votre menton dans le bas du masque et ajustez la barrette à votre nez.
- D. Placez les élastiques l'un après l'autre autour de la tête pour avoir une bonne tenue.
- E. Vérifiez la bonne étanchéité du masque en ajustant la barrette de nez.

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par l'importateur :